

## Pasientstyrt oksygentilførsel gjennom flowregulatoren FlexO<sub>2</sub>



### Introduksjon

Legen din har fastslått at oksygentilskudd vil være fordelaktig for deg og har foreskrevet en spesiell innstilling som dekker dine behov. Med FlexO<sub>2</sub> får du nå muligheten til å endre oksygenflow under anstrengelse. Flowinnstillingen justeres individuelt til deg for optimal oksygentilførsel ved aktivitet/hvile. Deretter kan du – med et enkelt grep – velge mellom aktivitet og hvilemodus, se fig. 2 og 3. Ved endring fra hvile til aktivitetsmodus kommer det et "puff". Dermed er du klar for aktivitet. «Puffet» som høres er helt normalt og er en bekreftelse på at innstilling for aktivitet er valgt.

### Tiltenkt bruk

FlexO<sub>2</sub> er et tilbehør til oksygenkonsentratorer som har en kule for innstilling av flow. Den er beregnet for pasienter med behov for regulering av oksygenflow avhengig av aktivitet/hvile, innenfor forhåndsbestemte nivåer.

### Forholdsregler

Sørg for at hvilemodus er valgt for hvile, slik at du ikke får for høyt oksygennivå. Ha rutine for regelmessig å sørge for at foreskrevet oksygennivå er riktig. Dette gjøres ved å lese av flowen på oksygenkonsentratoren når FlexO<sub>2</sub> er i respektive aktivitet og hvilemodus. Dersom du får problemer med å puste, bruker du foreskrevet medisinerings fra legen din som vanlig.

Kontroller regelmessig slangekoplingene og funksjon slik at det ikke oppstår lekkasjer

## Brukstid

Når to (2) måneders brukstid er passert, skal enheten skiftes ut. Dato for siste bruk, står skrevet på en etikett bak på enheten. Hvis enheten utsettes for skade, eller hvis den kan ha vært utsatt for skade, skal den byttes ut med en ny enhet.

## Rengjøring

Bruk en fuktet myk klut for å rengjøre enheten. Ved smitte kan den også rengjøres med 70 % sprit, Virkon og Perasafe ved behov.

## Service

Inneholder ingen deler som vedlikeholdes av brukeren.


## Kassering

Avhendes som vanlig avfall.

## CE-merking

FlexO<sub>2</sub> er CE-merket klasse IIA i henhold til MDD.

# Bruksanvisning

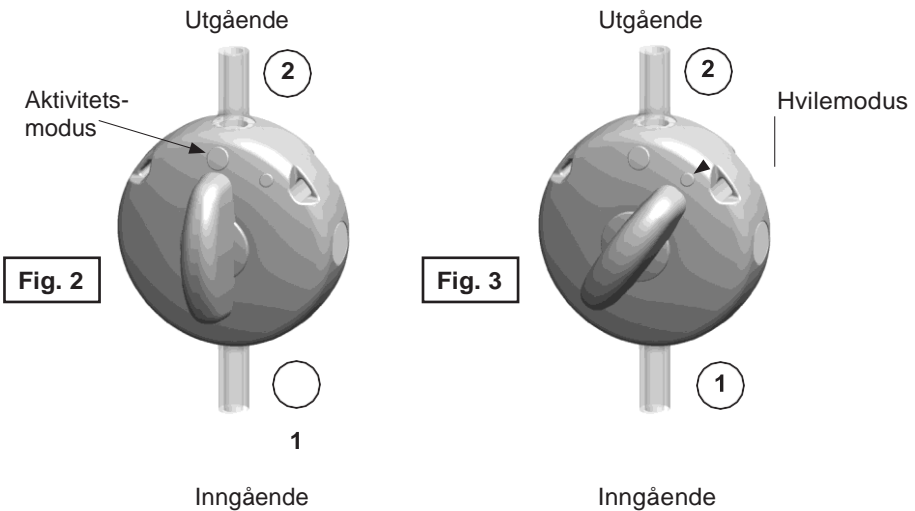

- ① Koblingsdel til slange fra oksygenkonsentrator
- ② Koblingsdel for nesegrime eller oksygenmaske.

