


Pasientstyrt flowbegrensning av oksygentilførsel fra oksygenkonsentrator

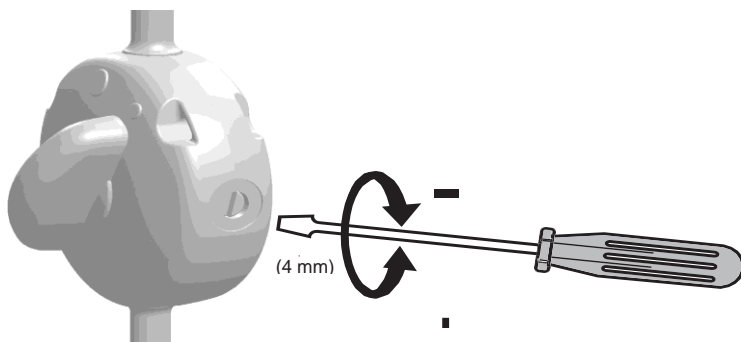

Innstilling av FlexO₂ for klinikere.

- **For innstilling av flow i aktivitet, gjør følgende:**

Start oksygenkonsentratoren og still inn O₂-flowen på angitt O₂ flow til aktivitet.

For innstilling av flow i hvile, gjør følgende:

Koble FlexO₂ til slangen fra oksygenkonsentratoren inn i slangkoplingen i underkant av Flex O₂.

Vri bryteren på Flex O₂ til hvileposisjon (til siden mot liten markering)

Bryteren skal peke mot den lille runde opphøyde markøren på FlexO₂.

Juster flowen til ønsket hvileflow er nådd. Innstillingen gjøres på høyre side av enheten med en vanlig skrutrekker. Pass på å ikke legge press på skrutrekkeren når justeringen utføres, dette kan påvirke justeringen. Flowen kan leses av på oksygenkonsentratoren. Nå har du innstilt flow i hvile.

Bytt mellom aktivitet og hvile et par ganger og sjekk at du får korrekt flow. Hvis ikke, kan du finjustere flowen med en skrutrekker som forklart tidligere.

Sett på en beskyttelse over skruerhullet, dette følger med FlexO₂.

Noter den siste bruksdatoen på etiketten som sitter på baksiden av enheten. Maksimal brukstid er to (2) måneder etter at brukeren har tatt enheten i bruk.

Informér og instruer brukeren om drift, bruk, forholdsregler og viktigheten av å bytte enheten annenhver måned.

Enheden kastes etter to måneders bruk og sorteres som brennbart avfall.

Tilbehør

Som tilbehør er det nakkebånd festet til de to øverste festepunktene på FlexO₂. Dette gjør at vekten er flyttet fra ørene og fordelt over en større overflate. Båndet har en sikkerhetsfunksjon som deler tapen, i tilfelle brukeren blir sittende fast i noe.

For all oksygenbehandling anbefaler vi S-Hook, slangeholder, som etter omfattende testing demonstrerer store fordeler ved å holde oksygenlangen rett ned til midjen.